

PRZEWODNIK PO DOPASOWANIU SOCZEWEK KONTAKTOWYCH AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL



Aby uzyskać ostre, dokładne widzenie z każdej odległości**
**postępuj zgodnie z prostymi zaleceniami zapewniającymi
większą skuteczność dopasowania**

1. Wybór soczewek próbnych

- Określ ekwiwalent sferyczny do dali (maksymalnie dodatni/ minimalnie ujemny) i przelicz go uwzględniając vertex distance.
- Określ okularowy dodatek do bliży (użyj możliwie najmniejszej addycji).
- Wybierz dodatek w soczewkach (LO, MED, HI) w oparciu o tabelę obok.

AIR OPTIX AQUA® MULTIFOCAL WYBÓR DODATKÓW	
DODATEK OKULAROWY	DODATEK OBUOCZNY
do +1,25	LO
od +1,50 do +2,00	MED
od +2,25 do +2,50	HI

2. Ocena soczewek próbnych

- Pozwól soczewkom ułożyć się na oczach przez 5 do 10 minut.
- Następnie pozwól użytkownikowi ocenić działanie soczewek poza gabinetem, podczas obserwacji odległych obiektów, np. budynków lub znaków drogowych. Zawsze sprawdzaj widzenie w warunkach obuocznych. Bez zasłaniania któregoś z oczu przeprowadź jednooczną lub obuoczną nadkorekcję do dali za pomocą trzymanyh w dłoniach soczewek lub flipperów z mocami co 0,25D, sprawdzając **jak dużo „plusa” do dali użytkownik będzie w stanie zaakceptować**. Dążymy do maksymalnego plusa przy maksymalnej ostrości do dali.
- Jeżeli nadkorekcja jest inna niż 0,00, to odpowiednio zmień moce soczewek próbnych, nie zmieniając mocy dodatków do bliży.
- Sprawdź jakość widzenia do bliży w warunkach normalnych dla pacjenta, najlepiej korzystając ze stosowanych przez niego na co dzień przedmiotów: zegarek, gazeta, telefon komórkowy.
- Jeżeli widzenie do dali i do bliży są satysfakcjonujące, to wydaj soczewki pacjentowi i zaleć stosowanie dobrego oświetlenia podczas czytania drobnego tekstu. Pozwól sprawdzić mu działanie soczewek w naturalnym otoczeniu.



Zaleca się, aby dalszej procedury poprawy widzenia NIE przeprowadzać wcześniej niż po tygodniu lub dwóch tak, aby użytkownik mógł doświadczyć widzenia w „realnym świecie”.

JAK POPRAWIĆ WIDZENIE?

Jeżeli pacjent nie mógł zaadaptować się do dobranych początkowo soczewek, to postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

Poprawa widzenia bliskiego

- Określ, które z oczu ma większą TOLERANCJĘ PLUSA (patrz Krok A i Krok B poniżej) poprzez umieszczenie soczewki +1,50 z kasytry próbnej na przemian przed każdym z oczu, przy zachowaniu obuocznego widzenia do dali. Za oko niedominujące uznajemy to, dla którego wstawienie soczewki +1,50 spowoduje mniejsze zamglenie obrazu
- Następnie sprawdź czy ostrość widzenia obuocznego z dodatkową soczewką +0,50 przed okiem niedominującym do bliży poprawiła się, a do dali jest nadal akceptowalna.

Krok A: Zmień soczewkę na oku niedominującym na nową z takim samym dodatkiem, ale **ze zmienioną o +0,50 mocą do dali**.

Krok B: Jeżeli widzenie bliskie nadal nie jest zadowalające, to zmień addycję zgodnie z poniższą tabelą.

Poprawa widzenia bliskiego, Krok A

Poprawa widzenia bliskiego, Krok B

DODATEK OKULAROWY	OKO DOMINUJĄCE	OKO NIEDOMINUJĄCE	DODATEK OKULAROWY	OKO DOMINUJĄCE	OKO NIEDOMINUJĄCE
od +1,25	LO	LO dodatkowo +0,50 do dali	od +1,25	MED	MED
od +1,50 do +2,00	MED	MED dodatkowo +0,50 do dali	od +1,50 do +2,00	MED	HI
od +2,25 do +2,50	HI	HI dodatkowo +0,50 do dali	od +2,25 do +2,50	HI	MED

Poprawa widzenia dalekiego

Jeżeli nadkorekcja do dali nie przyniosła poprawy widzenia dalekiego, to postępuj zgodnie z tabelą po prawej

DODATEK OKULAROWY	OKO DOMINUJĄCE	OKO NIEDOMINUJĄCE
od +1,50 do +2,00	LO	MED
od +2,25 do +2,50	HI	MED

AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL opis produktu

MOCE SFERYCZNE (D): od +6,00 do -10,00, co 0,25D	DODATEK MOCY: LO, MED, HI
MATERIAŁ: Lotrafilcon B	Dk, Dk/t: 110, 138 @ -3,00D
PROMIĘN: 14,2mm	KRZYWIZNA BAZOWA: 8,6mm
POWIERZCHNIA: Trwała modyfikacja w plazmie	UWODNIENIE: 33%
KONSTRUKCJA	
GRUBOŚĆ CENTRALNA: 0,08mm @ -3,00D	ZABARWIENIE: Jasno niebieskie
TRYB NOSZENIA: Dzienny lub przedłużony do 6 dni i nocy	
ZALECANY TRYB WYMIANY: Miesięczny	
ZALECANY SYSTEM PIELĘGNACYJNY: Płyn czyszcząco-dezynfekujący AOSEPT [®] PLUS	



W razie pytań lub braku poprawy ostrości wzroku proszę o kontakt z Konsultantem CIBA VISION, tel.: 22 375 75 87.



Dzielimy się pasją zdrowego widzenia i lepszego życia

*Soczewki kontaktowe AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL (Iotrafalcon B): Dk/t = 138 @ -3,00D. Inne czynniki mogą mieć wpływ na zdrowie oczu. **Bliskie, pośrednie i dalekie widzenie, u pacjentów z początkującą przebiopią.

Ważne informacje dotyczące soczewek kontaktowych AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL (Iotrafalcon B): Do użytku w trybie dziennym lub przedłużonym do 6 dni i nocy, dla osób nadwzrocznych/krótkowzrocznych i/lub z przebiopią. Przy przedłużonym noszeniu wzrasta ryzyko poważnych problemów okulistycznych (np. owrzodzenia rogówki). W niektórych przypadkach może to powodować spadek ostrości wzroku. Dodatkowo może wystąpić dyskomfort, pieczenie lub barwienie rogówki.

AIR OPTIX, AOSEPT, CIBA VISION, logo AIR OPTIX i logo CIBA VISION są znakami towarowymi Novartis AG.
© 2010 CIBA VISION AG, a Novartis AG company 2010-203-33232